

คู่มือการใช้งาน  
หุ่นขึ้นจำลองบาดแผล

Adult Emergency Wound Kit + Decubitus Ulcer Kit + Surgical Site Infection Level1  
(WK100 + WK145 + 800-657)

เป็นชุดจำลองบาดแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บ สำหรับสร้างสถานการณ์ช่วยผู้บาดเจ็บจากภาวะฉุกเฉินต่างๆ และแผลกดทับตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 4 สำหรับฝึกการประเมินความรุนแรงของบาดแผลและการดูแล รักษาที่เหมาะสมเพื่อให้การฝึกฝนเป็นไปอย่างสมจริงยิ่งขึ้น วัสดุทำจาก Silicone พิเศษเพื่อความสมจริง มีความทนทาน และยืดหยุ่นได้ดี

1. ชุดบาดแผลมี 11 ชนิด เป็นจำนวนชิ้นส่วน 18 ชิ้น ประกอบด้วยชนิดของบาดแผล ได้แก่



- บาดแผลถูกตัดและบาดแผลถลอกขนาดเล็ก (Small skin incision and skin abrasion)
- บาดแผลถูกตัดขนาดกลาง Skin incision (cut) medium size
- บาดแผลถลอกขนาดใหญ่ (Large Skin abrasion)
- บาดแผลลึกถึงกระดูกหัก (Compound bone fracture)
- บาดแผลถูกมีดบาด (Medium Knife wound) และบาดแผลถลอกขนาดกลาง (Skin abrasion)

- บาดแผลลึกที่ต้นขา (Deep wound in thigh)
- บาดแผลฟกช้ำและอักเสบที่ศีรษะ (Contusion to the head with inflammation)
- บาดแผลลึกขาดไม่ถึงกระดูกด้านซ้าย (Left side boneless laceration)
- บาดแผลเย็บที่ต้นขา (Thigh suture)

2. บาดแผลผ่าตัด



3. แผลกดทับตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 4



#### 4. อุปกรณ์ที่ต้องใช้



- น้ำยา Skin tite ขวดสีฟ้า ส่วนที่ 1
- น้ำยา Skin tite ขวดสีเหลือง ส่วนที่ 2
- ถ้วยผสมน้ำยา (ไม่ได้ให้มา)
- ที่คนน้ำยา
- ถุงมือ ควรใส่ถุงมือทุกครั้งขณะผสมน้ำยารวมทั้งขณะติดตั้งชิ้นส่วนบาดแผลเข้ากับหุ่น

#### 5. การเริ่มใช้งาน

- ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดพื้นที่จะทำการติดตั้งชิ้นส่วนผิวหนัง
- เหน้ยา Skin tite ขวดสีฟ้า ผสมขวดสีเหลือง โดยปริมาณที่ผสมขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของบาดแผล
- คนน้ำยาให้เข้ากัน (สภาพน้ำยาขณะนี้จะเหนียวคล้ายกาว)
- ทาน้ำยาที่ผสมแล้วบนพื้นผิวหนังของหุ่นตรงที่ตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งบาดแผล
- วางบาดแผลลงบนตำแหน่งที่ทาน้ำยากดลงเบาๆ ให้สนิทกับผิวหนัง ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
- หลังเสร็จสิ้นการฝึกใช้มือค่อยๆ ดึงบาดแผลออกแล้ว ใช้น้ำสบู่เช็ดทำความสะอาดบริเวณผิวหนังของหุ่น ผึ่งให้แล้ว ทาแป้ง ใช้กระดาษหรือผ้าห่อก่อนเก็บลงกระเป๋

#### 6. มีกระเป๋าบรรจุ