

คู่มือประกอบการใช้งาน
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารกเพศชาย
KOKEN BABY - Baby Boy (LM- 026M)



หุ่น Koken Baby ผลิตจากซิลิโคนชนิดพิเศษ ทำให้มีผิวสัมผัสและมีลักษณะคล้ายทารกจริง เหมาะสำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกหรือการผดุงครรภ์ รวมทั้งการสอนสาธิตต่างๆ ขนาดของหุ่นตัวยาวประมาณ 48 ซม. น้ำหนัก ประมาณ 3,000 กรัม แขนขาอ่อนนุ่มและจับงอ -เหยียด ได้ทุกทิศทาง ไม่มีรอยตะเข็บ ทำให้กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์ นำไปอาบน้ำในอ่างได้ไม่จำกัดครั้งโดยไม่ต้องกลัวหุ่นเสียหาย

คุณสมบัติพิเศษ

- ออกแบบกระหม่อมหน้าและกระหม่อมหลังเหมือนจริง รวมทั้งรอยต่อของกะโหลกศีรษะทั้งรอยต่อด้านหน้าและกลางศีรษะ
- คอไม่ยึดแข็ง
- ใบบहुงอได้
- ปากมีช่องเปิดตลอดลงไปถึงกระเพาะอาหาร ยาวประมาณ 15 ซม.
- จมูกมีช่องเปิดไปถึงกล่องเสียง ยาวประมาณ 5 ซม.
- แขนและขา จับงอได้หลายทิศทาง
- สายสะดือแกะออกได้ง่าย
- ถุงอัมตะมีลูกอัมตะ
- ช่องทวารหนักลึกประมาณ 3 ซม.

- ผิวไร้รอยตะเข็บ กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์
- ผิวที่ทำด้วยซิลิโคน ไม่เปลี่ยนคุณสมบัติ ทำให้ลงแช่น้ำได้โดยไม่มีข้อจำกัด

การนำไปใช้

1. ฝึกการอาบน้ำทารก (พยุงคอ ปิดใบหู และจัดแขนขา)
2. ฝึกการสังเกตและวัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ศีรษะ สะดือ ลูกอ้นทะ ฯลฯ
3. สามารถถ่ายภาพบำบัดทำที่ไม่ซับซ้อนได้
4. วัดปรอททางทวารหนัก
5. การดูแลทำความสะอาดสายสะดือ และดูแลความสะอาดสะดือหลังสายสะดือหลุด
6. หัดดูดเสมหะทางจมุก ในปาก ลงในกระเพาะอาหาร

ข้อควรระวัง

การจับต้องหรืออุ้มหุ่นขณะฝึกปฏิบัติอย่างไม่นุ่มนวล อาจทำให้หุ่นเสียหาย